


AF Genital System


SONUÇLAR

ÜROGENİTAL MİKOPLAZMALAR


SAYIM

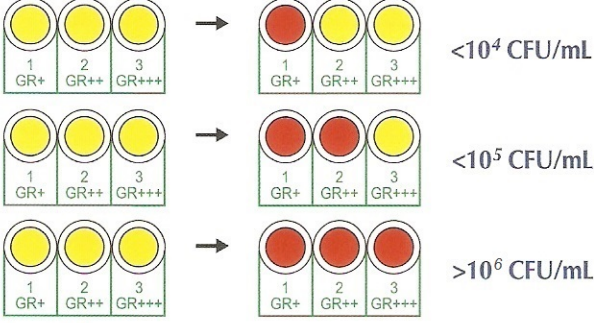

İDENTİFİKASYON

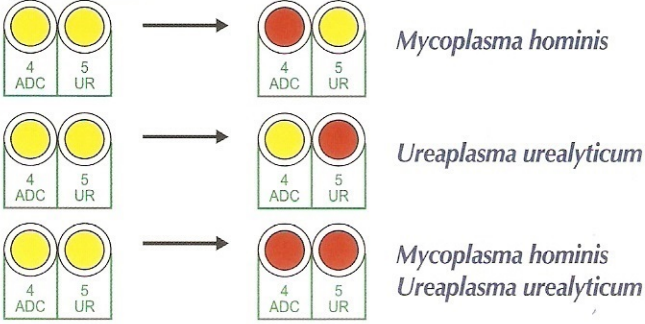

DUYARLILIK TESTİ

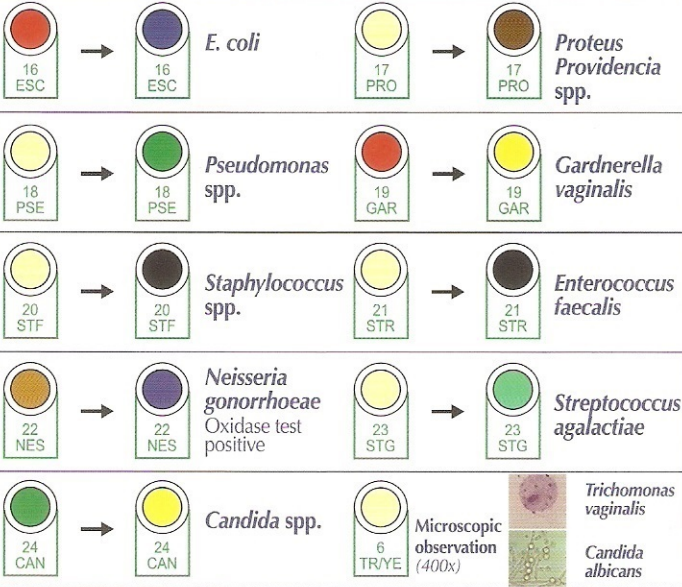

TANIM

PAKETLEME

REF.

TANIM	PAKETLEME	REF.
AF GENITAL SYSTEM	20 tests	74156
AF GENITAL SYSTEM reagent	100 tests	80258
STREPTO B latex KIT	50 tests	96153

TEST PROSEDÜRÜ



1

- Svab fizyolojik solüsyon içeren vial e daldırılır, 5 dakika sonra, vialin kenarına dikkatlice bastırılarak çıkartılır.



2

- Herbir kuyucuğa klinik numune süspansiyonundan 0,2 mL dağıtılır.



3

- 1'den 5'e; 7'den 15'e ve 19 ile 24 numaralı kuyucuklar 1 damla vazelin yağı ile kaplanır. Sistemin kapağı kapatıldıktan sonra 36°C de 18-24 saat inkübe edilir.




4

- 6-TR/YE kuyucuğundan 1 damla örnek alınarak mikroskop (x400) altında incelenir. Trichomonas vaginalis ve Candida spp. doğrulanır.



5

- 22-NES kuyucuğundan 1 damla alınarak oksidaz sribi üzerine damlatılır ve pozitif sonuç için mavi renk gözlemlenir

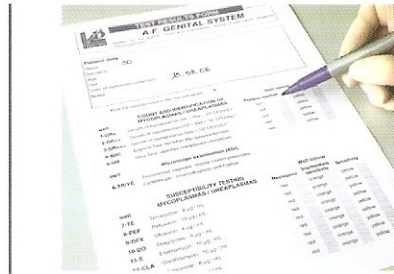


6

- Tüm sonuçlar kitle ile birlikte verilen form üzerine kaydedilir veya otomatik okuyucu ile değerlendirilir.

AF Genital System

MİKOPLAZMALARIN VE BAŞLICA ÜROGENİTAL MİKROORGANİZMALARIN KLİNİK ÖRNEKLERDEN DOĞRUDAN SAYIMI, İDENTİFİKASYONU VE DUYARLILIK TESTİ

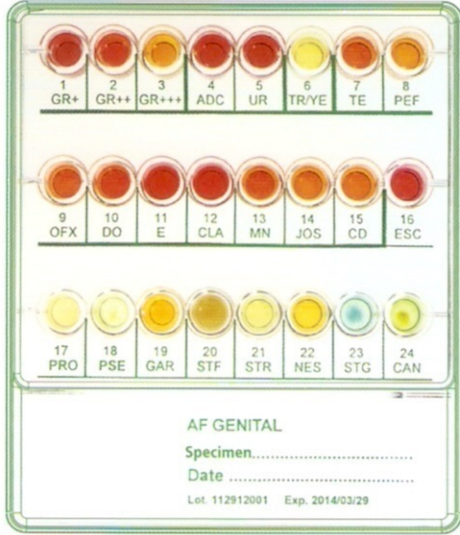

Klinik Örnekler

Vajinal Svab / Üretral Svab

Rektal Svab / Seminal Sıvı

Ürogenital Mikoplazmalar

Sayım / İdentifikasyon

Ureaplasma urealyticum , *Mycoplasma hominis*

Duyarlılık Testleri

Tetracycline, *Pefloxacin*, *Ofloxacin*,

Doxicycline, *Erytromycin*, *Clarithromycin*,

Minocycline, *Josamycin*, *Clindamycin*

Doğrudan Mikrobiyal İdentifikasyon

Escherichia coli, *Proteus spp.*, *Providencia spp.*

Pseudomonas spp., *Gardnerella vaginalis*, *Staphylococcus spp.*,

Enterococcus spp. (Grup D), *Neisseria gonorrhoeae*,

Streptococcus agalactiae (Grup B),

Candida spp., *Trichomonas vaginalis*

Yararları

- ✓ Tam tanı
- ✓ Doğrudan test ile zaman ve iş gücünden kazanç
- ✓ 24-48 saatte sonuç
- ✓ Net ve iyi tanımlanmış renk değişiklikleri
- ✓ Kolay yorumlama
- ✓ Otomatik okuma seçeneği

